



Rechtliche Hinweise und Gebrauchsanleitung zur Community Maske mit HeiQ Viroblock® NPJ03 Technologie

Wichtige Hinweise

- Beim beiliegenden Produkt handelt es sich um eine professionell gefertigte Community Maske und nicht um eine medizinische Atemschutzmaske. Die Community Maske hält keinen FFP-Standard ein und ist weder klinisch erprobt noch zertifiziert.
- Die korrekte Anwendung der Community Maske kann in Kombination mit den weiteren Empfehlungen der Behörden eine Ansteckungsverhinderung. Eine Gewähr oder Haftung hierfür werden indes nicht übernommen.
- Um die optimale Wirkung der Community Maske zu erreichen, ist es wichtig, dass Sie die nachfolgenden Anwendungs- Pflegehinweise sorgfältig durchlesen und einhalten. Die entsprechenden Hinweise wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Es wird keine Zusicherung oder Gewährleistung irgendwelcher Art betreffend Genauigkeit, Angemessenheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen abgegeben.
- Dieses Produkt wurde mit biozidem Silber* behandelt, um eine Kontamination durch Keime und Mikroben zu verhindern. *Wirkstoff: Silberchlorid

Richtige Anwendung



- **VOR DEM ANZIEHEN** der Community Maske sollten die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Lange Haare sollten nach hinten gebunden sein. Brillen sind während dem Anziehen der Community Maske auszuziehen.
- **BEIM ANZIEHEN** der Community Maske ist Folgendes zu beachten:
Die Community Maske sollte beim Anziehen nur von aussen berührt werden.
Die Community Maske soll an den Enden der Gummibänder angefasst. Zuerst wird der erste Elastik um den Kopf gelegt. Danach der zweite. Siehe dazu auch die Photo-Erklärung.
Der Nasenbügel der Community Maske kann auf die Nase gedrückt und dabei so geformt werden, dass sich die Maske eng an die Nase und die Wangen anlegt.
Die Maske kann danach mit Daumen und Zeigefinger nach unten über das Kinn gezogen werden. Es ist wichtig, dass die Community Maske das Kinn komplett bedeckt und auch die gesamte Nase (nicht nur die Nasenspitze) abgedeckt wird.
Jetzt kann auch eine Brille wieder angezogen werden, so dass die Brille über der Community Maske sitzt.

- **BEIM TRAGEN** der Community Maske ist drauf zu achten, dass die Maske nicht mit den Händen berührt wird.
- **BEIM AUSZIEHEN** der Community Maske sollte die Maske so entfernt werden, dass die Aussenseite der Community Maske nicht mit dem Gesicht in Berührung kommt. Die Community Maske ist sodann sicher zu verwahren und insbesondere vor dem Zugriff von Kindern zu schützen.
- **ANTIVIRAL-SHOP.CH AUFBEWAHRUNGSTASCHE** – für die Lagerung der Maske verwenden Sie am besten die Aufbewahrungstasche von antiviral-shop.ch welche ebenfalls aus Material besteht, welche in der Schweiz mit der HeiQ Viroblock® Technologie ausgerüstet wurde.

Die Tasche kann auf antiviral-shop.ch bestellt werden.

Maske Waschen & Pflegen

- Um das Infektionsrisiko für sich und andere zu minimieren sollten Sie Ihre Community Maske aus Stoff regelmässig reinigen. Hierfür benötigen Sie keine Desinfektionsmittel oder spezielle Reiniger.

Antiviral ausgerüstete Schichten:

- ✓ Innenstoff
- ✓ Aussenstoff



Komfortables Tragen

Die Produkte von antiviral-shop.ch sollen grösstmöglichen Schutz und Tragkomfort bieten. Die Masken können hinter den Ohren oder hinter dem Kopf fixiert werden. Mit dem Design der antiviral-shop.ch Produkte sind beide Tragarten möglich. Nachfolgend wird erläutert, wie die Maske mit den Kopfhalterungen verwendet wird.



Ausgangslage

Nach dem Händewaschen die Maske aus der Verpackung nehmen und möglichst an der Seite anfassen.

Schritt 1

Unteres Elastikband um den Hals legen.



Schritt 2

Oberes Elastikband um den Kopf (oberhalb der Ohren) legen und den Nasenbügel der Nasenform anpassen.

Schritt 3

Den Sitz der Maske der Situation anpassen. Mit dem unteren Elastikband kann die Dichtheit der Maske angepasst werden.

Maske lockerer tragen

Halteband um Kopf und Hals. Die Maskeläse im Kinnbereich etwas Luft entweichen.



Optimaler Schutz

Unteres Halteband über den Kopf legen, um die optimale Dichtigkeit zu erreichen.



Von Kopfbändern zu Ohrenbändern umbauen

Die nachfolgenden Bilder zeigen, wie Sie eine Maske mit Elastikbändern um den Kopf zu einer Maske mit Elastikbändern um die Ohren verwandeln.



Ausgangslage:

Dies Maske kann mit diesen Elastikbändern um den Kopf herum getragen werden.

Schritt 1

Der Knoten ist allenfalls in einem seitlichen Einfassband versteckt. Nehmen Sie den Knoten heraus und platzieren sie ihn mittig.



Schritt 2

Öffnen Sie den Knoten oder schneiden Sie in ab.

Schritt 3

Schneiden Sie das Band mittig auch auf der anderen Seite durch.



Schritt 4

Verknoten Sie die vier neuen Enden wie folgt und fertig ist die Ohren-Maske.

HEIQ
VIROBLOCK

HeiQ Viroblock® NPJ03

HeiQ Viroblock® NPJ03 ist eine Textilbehandlung für den industriellen Einsatz, die Textilien mit antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften ausstatten soll. Die Kombination aus antimikrobieller Silbertechnologie und Vesikeltechnologie zerstört schnell umhüllte Viren einschließlich Coronaviren. Mit HeiQ Viroblock NPJ03 behandelte Gewebe wurden gemäß ISO18184 mit verschiedenen umhüllten Viren getestet.

Weitere Merkmale der HeiQ Viroblock Technologie (siehe auch Webseite von www.heiq.com)

- Nach ISO 18184 starke antivirale und nach ISO 20743 antibakterielle Wirkung gegen umhüllte Viren und Bakterien.
- HeiQ Viroblock NPJ03 hat sich als wirksam gegen SARS-CoV-2, das COVID-19 verursachende Virus, erwiesen.
- Geeignet für alle Faserarten, von medizinischen Vliesstoffen (z.B. Gesichtsmasken) bis hin zu Stoffen für Bekleidung & Heimtextilien. Für waschbare Stoffe: Hält mindestens 30 Schonwaschgänge bei 60°C (140°F).
- Restvirusinfektiosität getestet nach einer modifizierten ISO 20743-Methode (Sendai), schnelle antivirale Wirkung innerhalb von 2-5 Minuten nachgewiesen.
- Hypoallergen, bietet selbst-sanitisierende und keimresistente Oberfläche.
- EU BPR & EU REACH-konform, Hauptbestandteil bei Swissmedic, US TSCA und US EPA registriert

Von HeiQ bereitgestellte Daten, basierend auf Tests, die nicht an diesen spezifischen Masken durchgeführt wurden.